


Gebruiksaanwijzing

Nederlands
7NL120114 Rev.6
2015-12-02

Voor de volgende modellen:
Likorall 200 Prod. nr. 3121001

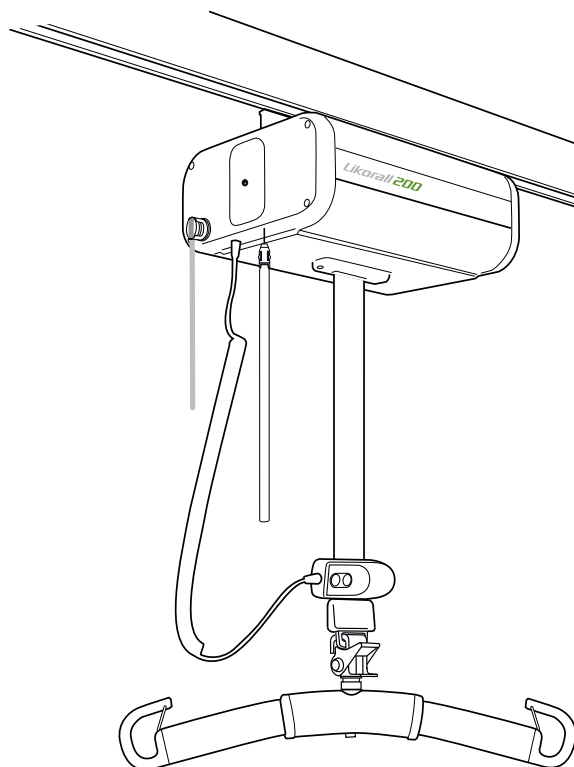

Productbeschrijving

Likorall is een stationaire lift, vaak “overheadlift” genoemd. Likorall wordt in het railsysteem van Liko gemonteerd dat is aangepast aan de kamer/kamers waarin het wordt gebruikt. Het railsysteem kan recht worden aangebracht, met en zonder bochten, als traverse systeem maar ook als systeem van kamer naar kamer. Het railsysteem van Liko bestaat uit meerdere honderden verschillende componenten, waaruit wij de specifieke componenten kiezen die nodig zijn om het systeem op maat aan te passen aan de kamer waarin het wordt gemonteerd. Het railsysteem kan vast of vrijstaand zijn, bijv. Liko FreeSpan en Liko FreeStand. Het systeem moet worden geïnstalleerd door bevoegd personeel en conform de installatie-instructies van Liko.

Likorall is bedoeld voor het tillen van patiënten en voor patiëntentransfers bijvoorbeeld vanuit bed naar een

rolstoel, op of van de vloer, voor toiletbezoek, voor loop-, sta- en balanceeroefeningen, om de patiënt te wegen of bij het optillen van een patiënt met een stretcher.

Likorall 200 is geschikt voor gebruik met het Liko-snelkoppelingssysteem. Voor veilig en eenvoudig verwisselen van tilaccessoires.

Met het Room-to-Room (R2R) systeem van Liko kan de patiënt worden verplaatst tussen twee railsystemen in verschillende kamers zonder dat de rails hoeven te worden gekoppeld en zonder dat er boven de deuren gaten hoeven te worden aangebracht.

Voor de Likorall is een breed assortiment accessoires verkrijgbaar, o.a. diverse modellen tilbanden in vele uitvoeringen en maten.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

△ is een waarschuwendriedriehoek voor situaties die extra zorg en aandacht vereisen.

BELANGRIJK!

Lees de gebruiksaanwijzing voor de patiëntenlift en de tilaccessoires vóór gebruik zorgvuldig door. Bij het tillen en verplaatsen van patiënten is er altijd sprake van bepaalde risico's. De aanwijzingen moeten goed zijn begrepen en het apparaat mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Neem bij onduidelijkheden of vragen contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	2
Definities	3
Technische gegevens	3
Maten.....	4
Montage.....	4
Bediening.....	5
Opladen van de batterijen	7
Verplaatsen van kamer naar kamer	8
Maximale belasting.....	9
Aanbevolen tilaccessoires	9
Eenvoudige foutopsporing.....	11
Inspectie en onderhoud	12

N.B.! Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor gebruikers van het product. Iedereen die dit product gebruikt, moet de inhoud van deze gebruiksaanwijzing lezen en deze goed begrijpen. Bewaar de gebruiksaanwijzing zo dat hij altijd beschikbaar is voor gebruikers van dit product.

Veiligheidsinstructies

△ De installatie van wagens voor de Likoall moet worden uitgevoerd door door Liko geautoriseerd personeel, conform de installatievoorschriften en aanbevelingen voor het actuele liftsysteem.

Zorg er vóór het eerste gebruik van de lift voor dat:

- de lift volgens de montagevoorschriften is gemonteerd
- de tilaccessoires naar behoren aan de lift zijn bevestigd
- de batterijen tenminste 8 uur zijn opgeladen
- u de gebruiksaanwijzing voor zowel de lift als de tilaccessoires hebt gelezen
- personeel dat de lift gebruikt bekend is met het juiste gebruik en de bediening van de lift en de tilaccessoires
- het tilaccessoire is gekozen dat past bij wat de patiënt nodig heeft voor wat betreft type, maat, materiaal en versie.

Controleer vóór het tillen altijd of:

- de liftband niet verdraaid of versleten is en vrij in en uit de lift kan bewegen
- de tilaccessoires niet beschadigd zijn
- het tilaccessoire correct en veilig rond de patiënt is aangebracht zodat er geen letsel kan optreden
- de tilaccessoires naar behoren aan de lift zijn bevestigd
- de tilaccessoires verticaal hangen en vrij kunnen bewegen
- de veiligheidsclips van het tiljuk in goede staat zijn. Ontbrekende of beschadigde clips moeten altijd door nieuwe worden vervangen
- de lussen van de tilband correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd; doe dit als de banden gestrekt zijn maar voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt.

△ Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht!



De Likoall 200 is getest door geaccrediteerde testinstituten en voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen voor Klasse I-producten (MDD 93/42/EEG).


Likoall voldoet aan de vereisten van EN ISO 10535:2006, IEC 60601-1, EN 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1 en CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1.

△ Dit product mag niet worden aangepast. Neem contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Er moet extra goed worden opgelet bij het gebruik van bronnen van elektromagnetische interferentie zoals diathermie, etc; kabels moeten uit de buurt van de lift worden gehouden. Neem in geval van vragen contact op met de verantwoordelijke technicus van de hulpapparatuur of de leverancier.

De lift mag niet worden gebruikt in ruimtes waar brandbare mengsels kunnen voorkomen, bijvoorbeeld in ruimtes waar brandbare goederen worden opgeslagen.

Definities

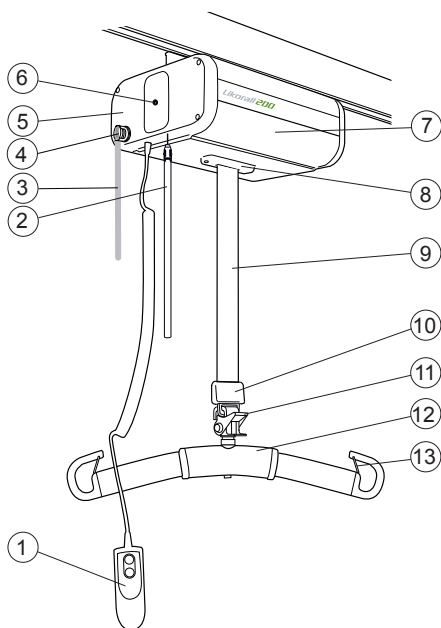


1. Handbediening met veerklem
2. Nooddaalfunctie (elektrisch)
3. Noodstopkoord
4. Noodstop
5. Eindkap
6. Ladingsindicator
7. Liftsysteem
8. Eindpositieschakelaar
9. Liftband
10. Q-link (snelkoppeling)
11. Snelkoppeling
12. Tiljuk
13. Veiligheidsclips

Technische gegevens

Maximale belasting:	200 kg	Intermittent gebruik:	Int. gebr 10/90, actief continu gebruik maximaal 0,5 min.
Batterijen:	2 stuks 12 V 2,4 Ah. Gesloten VRLA gelbatterijen. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij de leverancier.	Beschermings- klasse hefmotor:	IP 33
Batterijlader:	CH01 FW7218M/24; 100-240 V AC, 50-60 Hz, max 500 mA	Geluidsniveau:	51 dB
Liftsnelheid:	50 mm/s	Beschermings- klasse handbediening:	IP 54
Liftinterval:	2050 mm	Kracht nodig voor bediening hand- bediening:	3 N
Elektrische gegevens:	24 V, 12 A	Kabel lengte van de handbediening:	870 mm
Lift Afmetingen van het apparaat:	340x250x165 mm (LxBxH)	 Bedoeld voor gebruik binnenshuis.	
Gewicht apparaat:	12,5 kg	 Type B bescherming tegen elektrische schokken.	
Nooddaalsysteem:	Elektrisch		

Likorall is uitgerust met een SFS (Single Fault Safety) beveiligingstrommel. Deze gepatenteerde beveiligingsvoorziening biedt bescherming tegen ongecontroleerd dalen. De liftband heeft een tienvoudige bescherming.

Maten

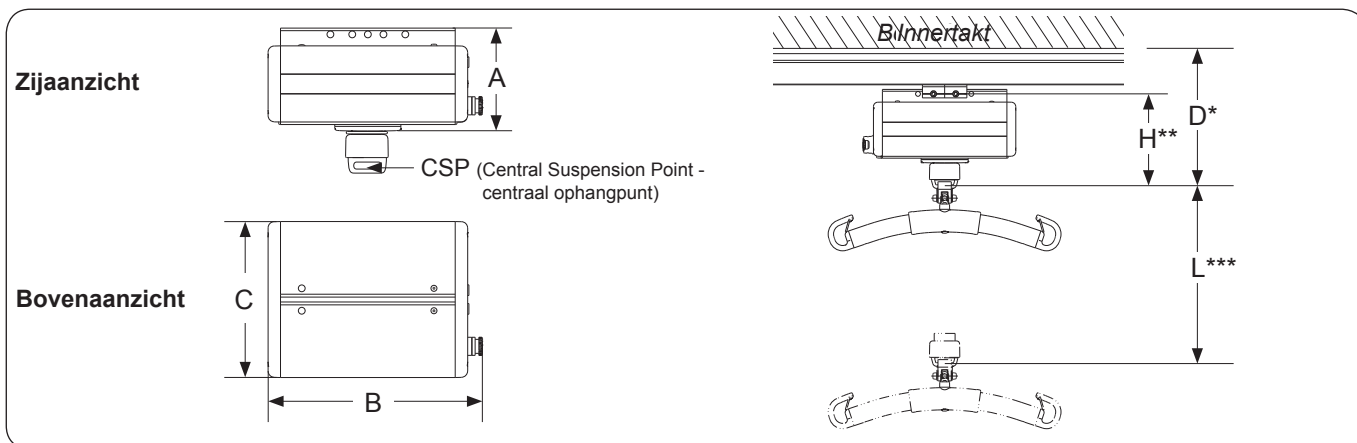

Maten in mm.

A	B	C	D*	H**	L***
165	340	250	293	210	2050

* Minimum afstand van plafond tot CSP bij maximale tilhoogte.

** Ingebouwde maat: de afstand tussen het bevestigingspunt voor de liftcassette op de wagen en het CSP bij maximale tilhoogte.


*** Tilinterval: de afstand tussen de maximale tilhoogte en minimale tilhoogte, gemeten bij het CSP.

Montage

Likorall mag uitsluitend worden gemonteerd en geïnstalleerd door bevoegd personeel en conform de installatie-instructies die zijn aangeleverd door Liko.

Controleer na het monteren of

- de liftfuncties overeenkomen met de knoppen op de handbediening
- de elektrische nooddaalfunctie naar behoren werkt
- de SSP Eindpositieschakelaar naar behoren werkt
- de batterijlader naar behoren werkt en de indicatielampjes branden tijdens het opladen
- de batterijen minimaal 8 uur zijn opgeladen, voordat de lift voor de eerste keer wordt gebruikt.

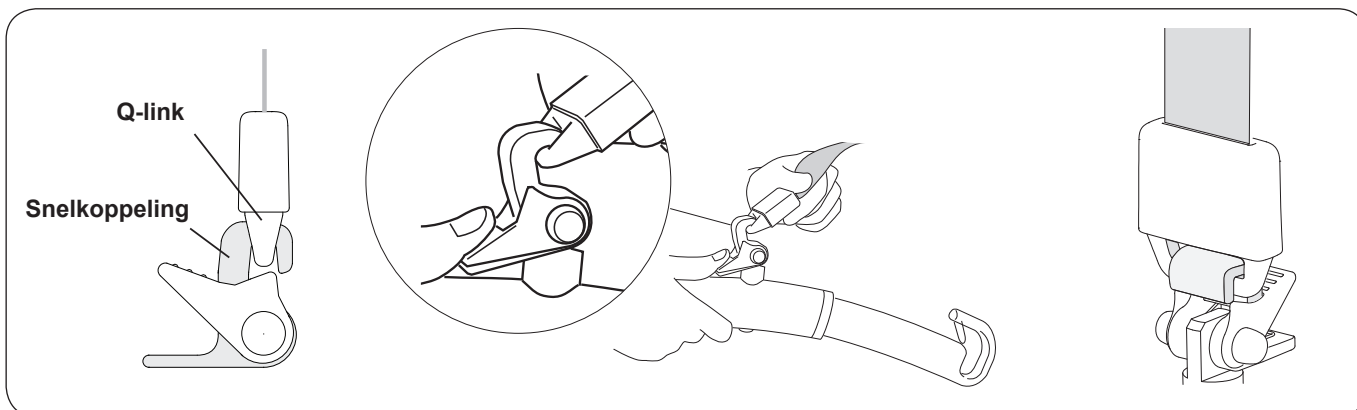


Tilaccessoire met snelkoppeling

Duw de rode vergrendelpal omlaag en bevestig de snelkoppeling aan de Q-link. Laat hem los en controleer of de pal blokkeert zodat de Q-link niet onbedoeld kan losraken. Lees meer over het snelkoppelingsysteem van Liko op pagina 10.

△ Controleer voor het tillen of de snelkoppeling correct aan de Q-link is bevestigd, zie de afbeelding hierboven.

Bediening

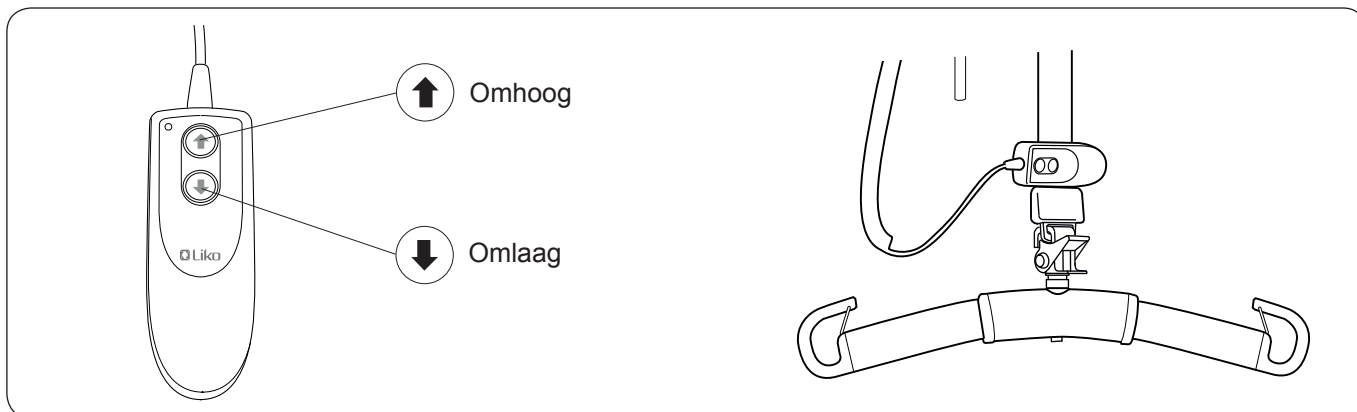


Bewegen

De tilbeweging van de Likorall 200 wordt bediend met behulp van de handbediening die eraan vast zit. De Likorall 200 wordt in beweging gezet door licht op de knoppen van de handbediening te drukken. De pijlen geven de richting aan. De beweging stopt als de knop wordt losgelaten.

Handbediening met veerklem

Als de lift niet wordt gebruikt kan de handbediening met de veerklem aan de achterkant van de handbediening worden bevestigd aan de liftband.

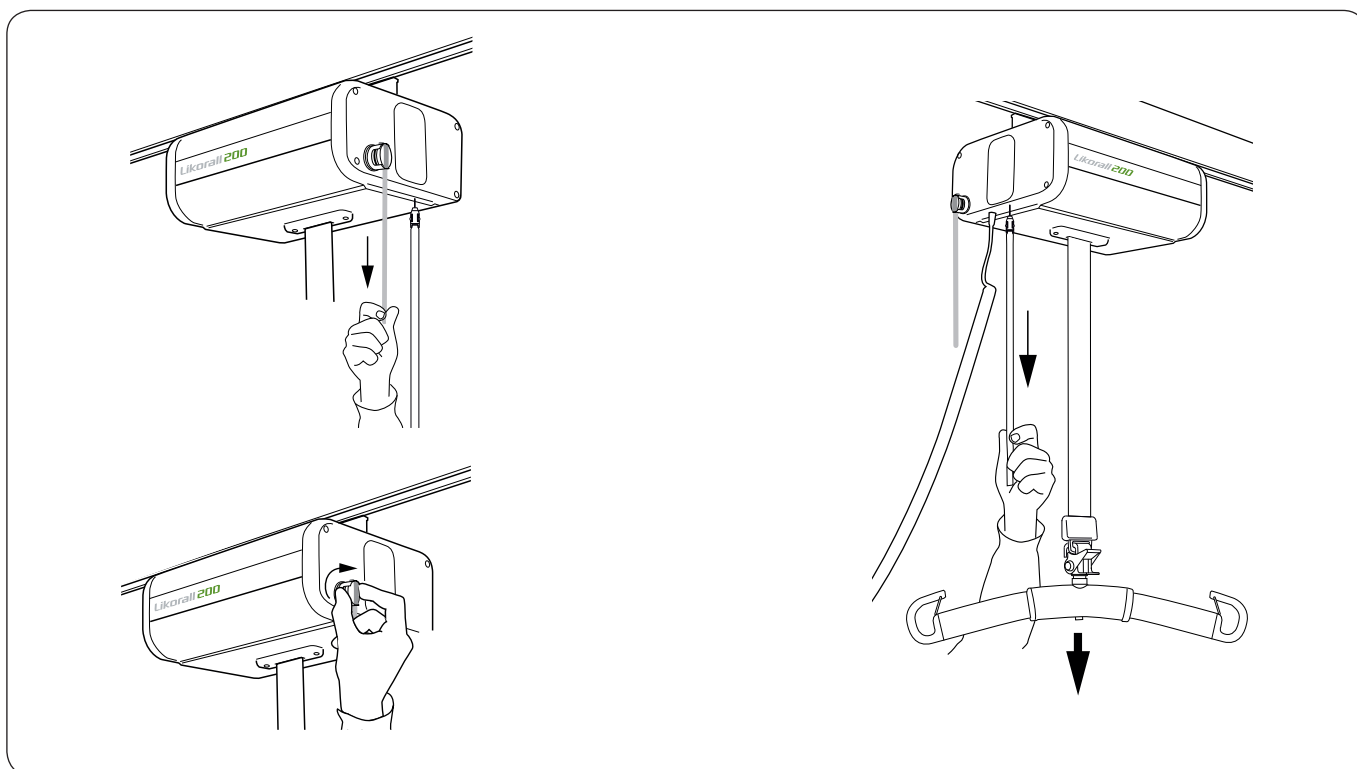

Noodstop

De noodstop activeren: trek aan het rode noodstopkoord.


De noodstop resetten: draai de rode noodstopknop in de richting die wordt aangegeven door de pijlen.

De rode knop op de eindkap van het tilapparaat is bedoeld voor noodsituaties. Als de knop wordt ingedrukt, wordt het contact tussen de motor en de voedingsbron verbroken, waardoor de liftbeweging stopt.

Elektrische nooddaalfunctie

In het geval dat de handbediening of de elektronische bedieningsfuncties niet werken, kan men de lift laten zakken door aan de nooddaalfunctie te trekken.


Bij gebruik van de nooddaalfunctie moet u er altijd voor zorgen dat u de patiënt op een bed, een rolstoel of een andere geschikte plek laat zakken.

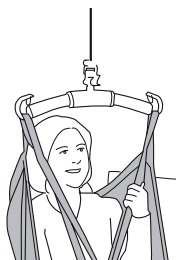

Afbeelding 1.



Afbeelding 2.

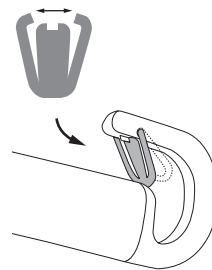

Til op de juiste wijze!

Controleer voor het tillen altijd of:




- de tilbandlussen op tegenoverliggende zijden van de tilband op dezelfde hoogte zijn
- alle tilbandlussen goed zijn bevestigd in de tiljukhaken
- het tiljuk horizontaal is tijdens het tillen, zie afbeelding 1.

△ "Als het tiljuk niet horizontaal is (zie afbeelding. 2) laat u de gebruiker neer op een stabiel oppervlak en stelt u de tilband bij volgens de gebruiksaanwijzing voor die tilband."

△ "Het onjuist tillen kan oncomfortabel zijn voor de gebruiker en kan schade aan de liftapparatuur veroorzaken! (zie afbeelding 2)."

Aanbrengen van veiligheidsclips

Controleer na de installatie of de veiligheidsclips vergrendelen en vrij in de tiljukhaak kunnen bewegen.

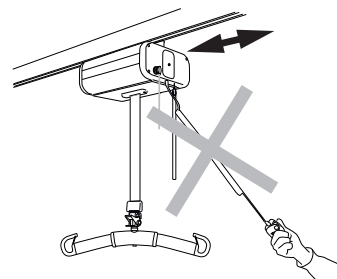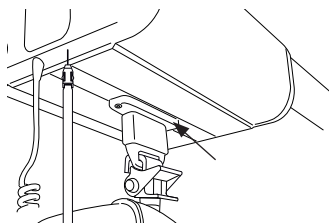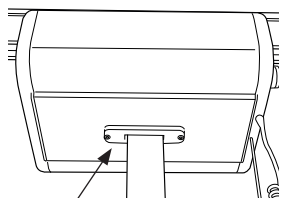




Eindpositieschakelaar

De liftbeweging wordt verbroken als u licht op de Eindpositieschakelaar aan de onderzijde van het tilapparaat drukt (zie de afbeelding).

Eindpositieschakelaar geactiveerd door de Q-link

Als de liftband van de Likorall de hoogste stand bereikt en er is fysiek contact tussen de Eindpositieschakelaar en de Q-link, dan wordt de Eindpositieschakelaar geactiveerd. De functie onderbreekt elektrisch de liftbeweging en beschermt het tilapparaat tegen mechanische belasting. De Eindpositieschakelaar biedt ook bescherming tegen afklemmen.

△ Verplaats de lift nooit door aan de handbediening te trekken!

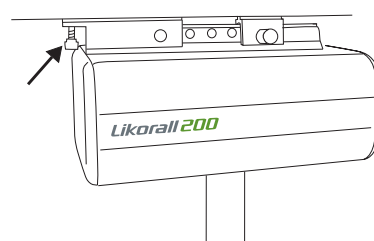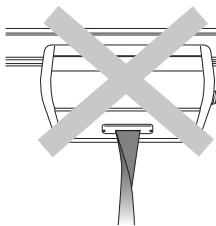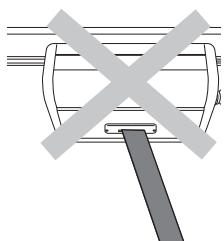

Eindpositieschakelaar geactiveerd door de liftband


Voor veilige bediening is het belangrijk dat de beweging van de liftband zo verticaal mogelijk verloopt. De Eindpositieschakelaar is bedoeld om de liftbeweging te onderbreken als er teveel spanning op de liftband komt te staan, bijvoorbeeld als hij zijwaarts wordt getrokken of omgevouwen wordt tijdens de liftbeweging. Als de Eindpositieschakelaar zodanig wordt geactiveerd dat de liftbeweging stopt, kan de lift weer worden bediend als de liftband weer recht is (er kan een korte vertraging optreden bij het opnieuw starten van de liftbeweging; dat is in dergelijke gevallen normaal).

△ Let erop dat de liftband recht en aangespannen blijft als hij het tilapparaat in- en uitloopt.

Verstelbare frictierem

De hoeveelheid trekkracht op de lift wordt afgesteld met de frictierem op de loopwagens. Draai de rem rechtsonder om de weerstand te vergroten en linksom om de weerstand te verminderen.


De volgende loopwagens hebben een frictierem: Prod. nr. 3126011 en 3126015.

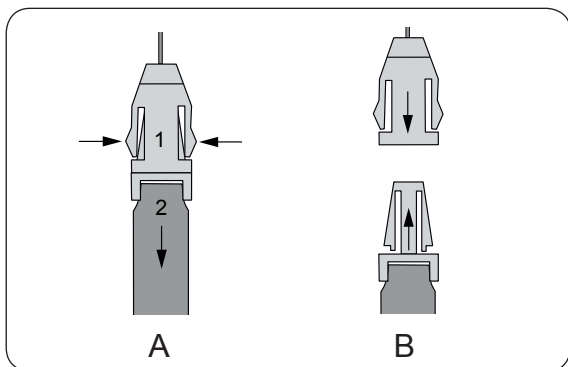

A: Haal de band van de nooddaalfunctie los.

B: Zet de band van de nooddaalfunctie vast.

Opladen van de batterijen

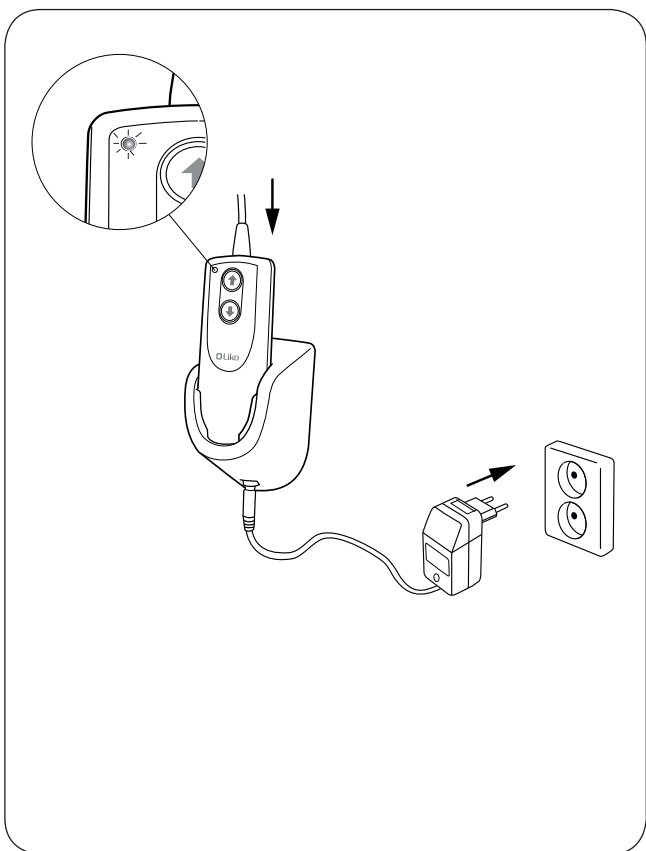


Om een maximale levensduur van de batterijen te garanderen moeten deze regelmatig worden opgeladen. Aanbevolen wordt de batterijen na gebruik of elke nacht op te laden.

Na maximaal 8 uur is het systeem volledig opgeladen. Volledig opgeladen batterijen gaan ongeveer 60 hefbewegingen mee.

1. Zorg ervoor dat de noodstop tijdens het opladen niet is ingedrukt.
2. Steek de handbediening in de oplader en sluit de oplader aan.
3. Sluit de oplader aan op een 100 - 240 V AC stopcontact.
4. Op de handbediening gaat een LED branden wat aangeeft dat de oplader is aangesloten op een stroombron.
5. Het opladen begint automatisch en een gele LED geeft aan dat de batterijen worden opgeladen.
6. De oplader schakelt automatisch uit als de batterijen volledig zijn opgeladen. De gele LED gaat dan uit.

N.B.! Als de lift langere tijd niet gaat worden gebruikt, plaats dan de handbediening in de oplader om de batterij op te laden.

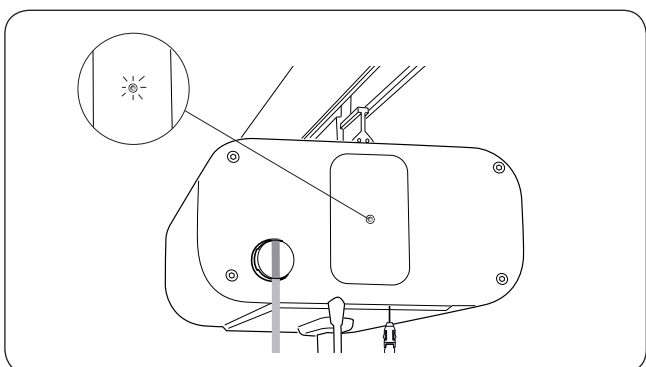

Oplaadindicatie

De Likorall heeft twee indicaties die aangeven dat de batterij bijna leeg is:

- Tijdens het tillen klinkt een zoemer
- Een LED gaat branden tijdens het tillen

Wanneer een van beide waarschuwingssignalen waar te nemen is, moet het apparaat zo snel mogelijk worden opgeladen.




Likorall voldoet aan de Richtlijn 2002/96/EG voor afval van elektrische en elektronische apparatuur. Oude batterijen moeten volgens de geldende voorschriften worden afgegeven bij een inzamelpunt of aan door Liko/Hill-Rom geautoriseerde medewerkers.

Verplaatsen van kamer naar kamer


Het Liko R2R-systeem (kamer-naar-kamer) is een efficiënte oplossing om een patiënt veilig en gemakkelijk naar een andere kamer te verplaatsen. Het R2R-systeem wordt gemonteerd zonder openingen te maken in wanden; dat behoudt de volledige isolatie tussen de kamers waarin het systeem is gemonteerd.

Het verplaatsen wordt veilig en gemakkelijk uitgevoerd met behulp van afzonderlijke railsystemen voor elke kamer. Met het Liko R2R -systeem kunnen twee Likoralls worden gekoppeld bij het verplaatsen van kamer naar kamer. De feitelijke verplaatshandeling tussen twee kamers wordt uitgevoerd met een comfortabele verplaatsing voor de patiënt van één Likorall naar de andere.

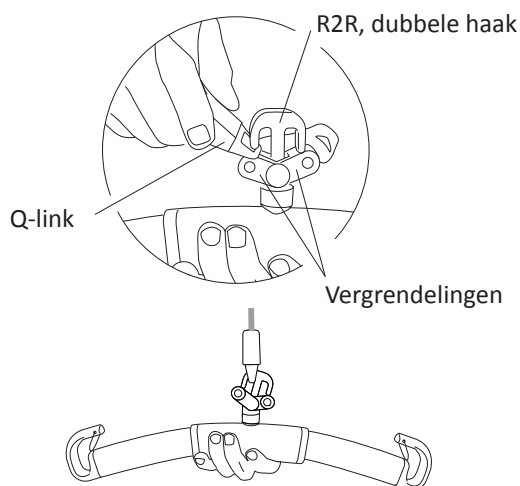


Bevestigen van een Q-link aan het universele tiljuk R2R

Het universele tiljuk R2R met dubbele haak is geschikt voor twee Q-links. De twee rode vergrendelingen houden de Q-link op zijn plaats in de R2R dubbele haak voordat de hijsband wordt belast. Open de rode vergrendeling voorzichtig als u een Q-link in de R2R dubbele haak zet.

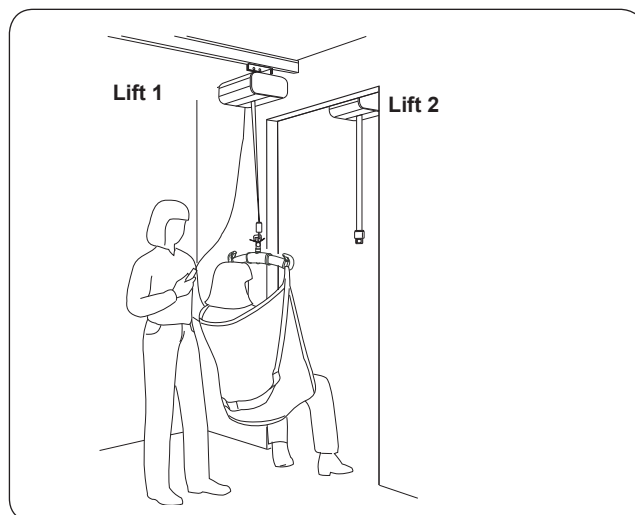

1. Verplaats lift 1 met daarin de patiënt zo dicht mogelijk naar de deuropening. Laat de lift zo ver mogelijk neer maar denk aan het comfort van de patiënt.

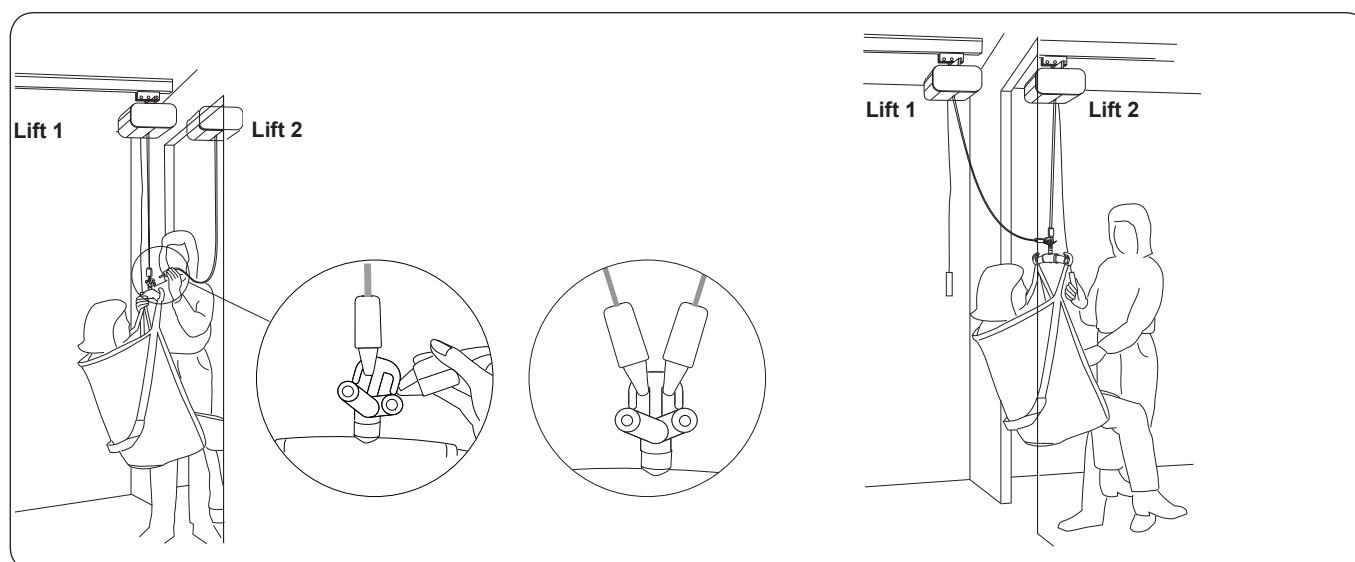

2. Verplaats lift 2 zo dicht mogelijk naar de deuropening. Laat de hijsband van lift 2 voldoende neer en bevestig de Q-link aan het universele tiljuk R2R. Controleer of de vergrendelingen op de R2R dubbele haak goed werken.

3. Laat de lift 2 omhoog gaan. De patiënt wordt nu naar de volgende kamer gebracht en wordt uiteindelijk alleen gedragen door lift 2. Als de hijsband van lift 1 spanningsvrij is neemt u de hijsband los van het universele tiljuk R2R zodat de verplaatsing in de volgende kamer kan worden voortgezet.

OPMERKING! Om de Q-link los te maken van het universele tiljuk R2R kan het nodig zijn om meer hijsband van lift 1 te laten vieren.

Maximale belasting

Bij een compleet tilsysteem kunnen voor de onderdelen ervan verschillende maximale belastingen gelden: het railsysteem, de lift, het tiljuk, de tilbanden en alle andere accessoires. Voor het gehele tilsysteem, inclusief de accessoires, is de maximale belasting gelijk aan de maximale belasting van het onderdeel met de laagste toegestane belasting. Bijvoorbeeld: Een Liko-rail die is goedgekeurd voor 200 kg kan zijn voorzien van een tiljuk is goedgekeurd voor 300 kg. In dat geval geldt een maximale belasting 200 kg voor het gehele tilsysteem. Bekijk de markeringen op de lift en de tilaccessoires, of neem bij vragen contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Aanbevolen tilaccessoires

⚠ Het gebruik van andere dan de aanbevolen tilaccessoires kan gevaar opleveren.

Liko biedt een groot assortiment tiljukken, tilbanden, stretchers, weegschalen en andere tilaccessoires als oplossing voor de meeste tilbehoeften. Hieronder vindt u een overzicht van de tilaccessoires die leverbaar zijn voor de Liko-rail 200.

Zie voor de keuze van geschikte tilbanden en andere tilaccessoires de brochure "Tilaccessoires". Zie voor meer aanwijzingen over de keuze van een tilband de instructiegids voor het betreffende model tilband. Hierin staat ook advies over geschikte combinaties van Liko-tiljukken en Liko-tilbanden.

Neem contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger of ga naar www.liko.com voor advies en informatie over het productenassortiment van Liko.

Tiljuk Mini 220 R2R
Max. belasting 205 kg

Prod. nr. 3156006



Universeel tiljuk 350 R2R
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156094




Universeel tiljuk 450 R2R
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156095




Tiljuk Mini 220
Max. belasting 205 kg
(vereist snelkoppeling TDM)

Prod. nr. 3156005

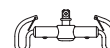

Universeel tiljuk 350 met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156084

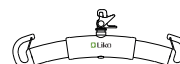

Universeel tiljuk 450 met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156085



Universeel tiljuk 600 met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156086



Universeel tiljuk 670 Twin met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156087




Universele zij-jukken 450 incl. tas
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156079




Kruisjuk 450 met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156022

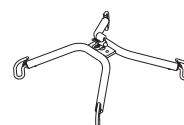

Kruisjuk 670 met snelkoppeling
Max. belasting 300 kg

Prod. nr. 3156019

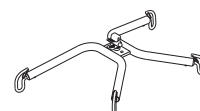


Snelkoppeling

Met het snelkoppelingsysteem van Liko kunnen tilaccessoires van Liko snel en eenvoudig worden verwisseld. Liko snelkoppelingen beschermen tegen onbedoelde ontkoppeling. Likorall 200 wordt louter gebruikt met tilaccessoires die zijn voorzien van snelkoppelingen.

De Snelkoppeling universeel past op de Universele Tiljukken 350, 450 en 600 (Prod. nr. 3156074-3156076). De Snelkoppeling TDM past bij Tiljuk Mini 220 (Prod. nr. 3156005), de Kruisjukken 450 en 670 (Prod. nr. 3156021 en 3156018) en het Universele Kruisjuk 670 (Prod. nr. 3156077).

Zie de "Guide to Liko's Quick-release Hook system", te downloaden van onze website www.liko.com, of neem contact op met Liko/Hill-Rom voor meer informatie over de voordelen en het gebruik van de snelkoppelingsysteem.

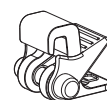

**Snelkoppeling
Universeel**
Prod. nr. 3156508




**Snelkoppeling
TDM**
Prod. nr. 3156502

Batterijlader voor Likorall 200

CH01 EU 24V/0,5A


Prod. nr. 3126131

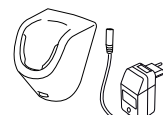

Stretcher

Alle stretchers in het product assortiment van Liko zijn te gebruiken in combinatie met de Likorall.

Neem contact op met Liko/Hill-Rom voor meer informatie.

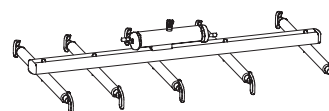


Weegschaal

Wanneer u mensen moet wegen in combinatie met de Likorall, bevelen we het gebruik aan van LikoScale 350. Deze is eenvoudig te monteren met de LikoScale adapterset.

De LikoScale 350 is gecertificeerd volgens de Europese richtlijn NAWI 90/384 (Non Automatic Weighing Instruments).

Neem contact op met Liko/Hill-Rom voor meer informatie.

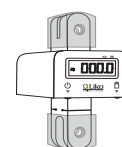

LikoScale 350
Prod. nr. 3156228

Liko steunveren voor spring- en loopoefeningen

Er zijn elastische veren verkrijgbaar als accessoire die moeten zorgen voor een zachtere en meer verende beweging, bijv. tijdens loopoefeningen. De veren zijn verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen:

Lang, 28 cm, voor een patiëntengewicht per paar van max. 70 kg

Prod. nr. 3156511


Kort, 22 cm, voor een patiëntengewicht per paar van max. 70 kg

Prod. nr. 3156512

Kort, 22 cm, voor een patiëntengewicht per paar van max. 100 kg

Prod. nr. 3156513

Zie voor meer informatie ook de gebruiksaanwijzing voor het Liko MasterVest, model 60, 64, of de Liko Broektilband, model 92.

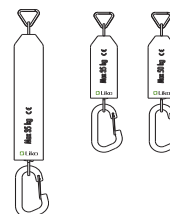

Tiljukbescherming Paddy 30

(past op Universele tiljukken 350, 450 en 600 en het Tiljuk smal 350)


Prod. nr. 3607001



Snelkoppelingwagen LR

Past op de snelkoppelingadapter LR prod. nr. 3126009


Prod. nr. 3126008

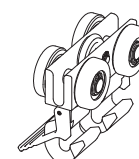

Snelkoppelingadapter LR

Past op de snelkoppelingwagen LR prod. nr. 3126008

Prod. nr. 3126009

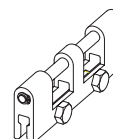

Parkeerpaneel 600, LR/MR
Parkeerpaneel 1500, LR/MR

Kan worden afgerond met de volgende accessoires:

Haak voor tiljuk

Haak voor accessoires


Instructiekaart (zie betreffende product)

Prod. nr. 3126075

Prod. nr. 3126080

Prod. nr. 3126070

Prod. nr. 3126071

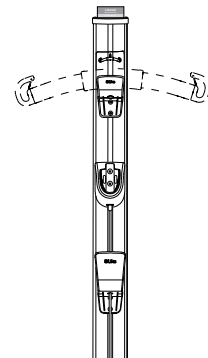

Eenvoudige foutopsporing

De lift werkt niet.



1. Controleer of de noodstopknop niet is ingedrukt (blz. 5).
2. Laad de batterij op (blz. 7).
3. *Neem contact op met Liko/Hill-Rom als de lift nog steeds niet goed werkt.*

De lift geeft een herhalend geluidssignaal.



1. Laad de batterij onmiddellijk op (blz. 7).
2. *Neem contact op met Liko/Hill-Rom als de lift nog steeds niet goed werkt.*

De lift geeft een herhalend LED-sigitaal.



1. Laad de batterij onmiddellijk op (blz. 7).
2. *Neem contact op met Liko/Hill-Rom als de lift nog steeds niet naar behoren werkt.*

De lift stopt in een hoge stand.



1. Controleer of de noodstopknop niet is ingedrukt (blz. 5).
2. Gebruik de elektrische nooddaalfunctie om de patiënt te laten zakken op een stabiel oppervlak (blz. 5).
3. Laad de batterij op (blz. 7).
4. *Neem contact op met Liko/Hill-Rom als de lift nog steeds niet naar behoren werkt.*

De lift haalt haar maximale hefvermogen niet.



1. De batterij opladen (blz. 7).
2. *Neem contact op met Liko/Hill-Rom als de lift nog steeds niet naar behoren werkt.*

Als de lift lawaai maakt of lekt!



Neem contact op met Liko/Hill-Rom.

Inspectie en onderhoud

Verzorging en onderhoud

Voor een probleemloos gebruik moeten enkele punten elke dag dat de lift wordt gebruikt worden gecontroleerd:

- Controleer de lift op uitwendige beschadigingen.
- Controleer de bevestiging van het tiljuk.
- Kijk de liftband na op slijtage en controleer of de band niet gedraaid zit.
- Controleer de werking van de veiligheidsclips.
- Controleer de bedieningsfunctie van de liftbeweging.
- Controleer of de nooddaalfunctie goed werkt.
- Laad de batterijen op elke dag dat de lift wordt gebruikt op en controleer of de oplader werkt.

Reinig de lift zo nodig met een vochtige doek. Meer informatie over het reinigen en de desinfectie van uw Liko/Hill-Rom-product staat in het document Care and Maintenance op onze website: www.liko.com.

△ De lift mag niet worden blootgesteld aan stromend water.

Onderhoud

De Likorall moet periodiek en ten minste een maal per jaar worden geïnspecteerd.

△ De periodieke inspectie, reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd conform de Liko Onderhoudshandleiding, door door Liko geautoriseerd personeel en met gebruikmaking van originele Liko reserveonderdelen.

Onderhoudsovereenkomst

Lopital biedt klanten de gelegenheid tot het afsluiten van servicecontracten voor het onderhoud en de periodieke inspectie van uw Liko-producten.

Verwachte levensduur

Bij correcte behandeling, onderhoud en regelmatige inspecties conform de instructies van Liko heeft het product een verwachte levensduur van 10 jaar.

Transport en opslag

Tijdens het transport of wanneer de lift langere tijd niet wordt gebruikt moet de noodstopknop worden ingedrukt. De omgeving waarin de lift wordt vervoerd en opgeslagen moet een temperatuur hebben tussen de 10 en 40 °C en een luchtvochtigheid tussen de 30 en 75%. De luchtdruk moet tussen de 700 en 1060 hPa zijn.

Recyclen

Ga voor aanwijzingen over het recyclen van uw Liko-product naar onze website: www.liko.com.

Productwijzigingen

Producten van Liko worden voortdurend verder ontwikkeld; wij behouden ons daarom het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor adviezen en gegevens over productupgrades contact op met uw Liko/Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Het Hill-Rom Management-systeem is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de equivalent voor producenten van medische hulpmiddelen, ISO 13485. Het Hill-Rom Management-systeem is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.



A  Company

www.liko.com.

Fabrikant:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
+46 (0)920 474700
Zweden